


Torniquete Tático

Indicações:

Para uso em hemorragias graves nos membros. Pode ser usado em contexto tático ou em socorro pré-hospitalar. Requer formação adequada dos utilizadores.

Especificações

Largura	Tolerância	Comprimento	Tolerância	Peso	Material
38 mm	+/- 2 mm	950 mm	+/- 10 mm	75 g	Nylon

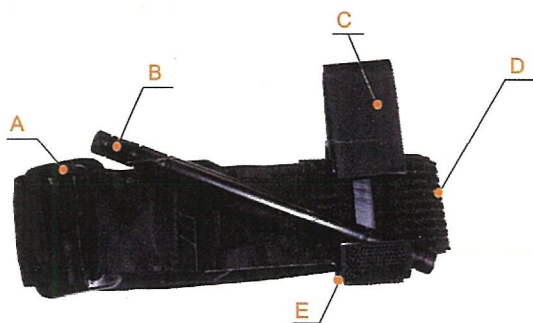

- A – Fivela de via única
- B – Haste de aperto
- C – Etiqueta de hora de aplicação
- D – Ponta do torniquete
- E – Clipe de fixação da haste


Utilização com uma mão

- ① Desenrole o torniquete e insira a ponta vermelha na fivela formando uma argola (preferencialmente já deve ser enrolado desta forma).
- ② Passe o membro ferido pela argola.
- ③ Aperte bem a fita e fixe-a com o velcro.
- ④ Rode a haste lentamente para qualquer dos lados, apertando o torniquete até que a hemorragia esteja controlada (e só até esse ponto).
- ⑤ Fixe a haste firmemente no clipe.
- ⑥ Escreva a hora de aplicação na etiqueta prevista para o efeito.



Tipos de uso:

- ① Ferimentos em combate.
- ② Treinos táticos.
- ③ Operações de resgate médico.
- ④ Aventura e outdoor.
- ⑤ Operações policiais ou militares.
- ⑥ Campismo e escalada.

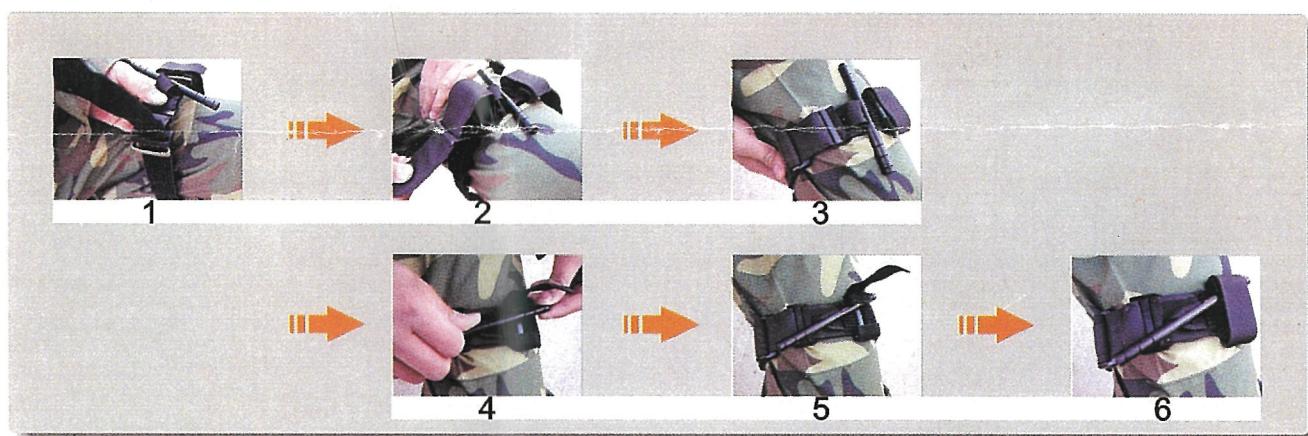

Tipos de uso:

- O torniquete deve apenas ser usado por pessoal treinado e sempre de acordo com as linhas orientadoras mais recentes. Apesar de não ser recomendado o aperto por períodos superiores a 1 hora, o alívio do garrote está vedado a leigos, devendo apenas ser efetuado por pessoal médico habilitado.
- O torniquete deve ser aplicado no mínimo 5 a 8 cm acima da hemorragia, sendo mais eficaz a aplicação acima das articulações proximais de cada membro. Nunca abaixo da ferida.
- Não deve ser aplicado sobre objetos sólidos (talas ou outros).
- Recomenda-se a leitura das instruções antes do uso.
- O torniquete uma vez usado deve ser descartado de acordo com as normas locais.

Armazenamento:

Este dispositivo deve ser armazenado nas condições ideais de temperatura e humidade (-5~30°C e humidade <80%), tendo um período de validade ideal de 5 anos.